

Guia de Usuario

Acerca de tu dispositivo

Importante

Este reloj de seguridad está diseñado específicamente para personas mayores y trabajadores aislados. Combina diversas funciones inteligentes, como alarmas SOS, llamadas bidireccionales, monitorización de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y pasos. Su funcionamiento es muy sencillo. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo.

Accesorios



Reloj



Base de Carga



Cable USB



Cuidados



Pantalla

Boton de SOS



Altavoz



Contacto de Carga

Sensor de monitor cardiaco

Cargue su Cuidados plus



- Coloque el dispositivo en la base de carga
- Conecte el cable USB de la base de carga al adaptador de corriente AC

Carge completamente el reloj diariamente alrededor de 2 hs o cuando la batería este baja



TIPs

La batería no se puede cambiar

Después de un largo período de inactividad, es posible que el reloj no se encienda debido a poca batería. Cárguelo todos los días para asegurarse de que el reloj pueda funcionar normalmente.

Guia de Usuario

Prenda su Cuidados Plus



De 5 a 10 Seg

Para encenderlo: Presione el botón de SOS entre 5 a 10 seg hasta que la pantalla se prenda



Para apagarlo: entre al menu de configuración , seleccione apagado y luego vuelva a apretar la opcion de apagar

Funciones y seteos basico



Al encender el reloj, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las funciones disponibles, como contactos, esferas, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, seguimiento de pasos, alarma, ajustes y más.

En la pantalla de inicio de esferas, puedes ver la hora, la fecha y la información de la batería.

Funcion pasos



Desliza el dedo hacia la derecha para acceder a la interfaz de Pasos. El conteo de pasos está habilitado por defecto y disponible todo el día. También puedes ver la distancia recorrida y las calorías consumidas.

Medicion de frecuencia cardiaca



Deslice el menu hasta la funcion de monitor cardiaco, coloque el reloj en la mano izquierda y haga clic en la frecuencia cardíaca; después de verificarlo durante varios segundos, la pantalla mostrará su frecuencia cardíaca (BPM).



Guia de Usuario

Medicion de Oxigeno en Sangre



Deslice el dedo hasta llegar al menu de medicion de oxigeno en sangre, haga clic en el icono "Oxígeno en sangre". Tras unos segundos, la pantalla mostrará su porcentaje de saturación de oxígeno en sangre.

Activacion de alarma SOS

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos, el dispositivo vibrará y mostrará el estado de alarma SOS en la pantalla.

Tras activarse la alarma SOS, escuchará un mensaje de voz que confirma la activación de la alerta SOS y le da aproximadamente 10 segundos para cancelarla.



Si no se cancela a tiempo, se enviará inmediatamente un mensaje de texto de alerta SOS a los contactos de emergencia, seguido de las llamadas salientes.

Si el reloj no se conecta al primer número, llamará al segundo tras un retraso de 10 segundos. Si el segundo número tampoco se conecta, el sistema se conectará al tercero, y así sucesivamente.

Entre cada llamada, habrá un retraso de 10 segundos, durante este tiempo, el usuario puede detener la secuencia de llamadas o evitar una posible falsa alarma presionando el botón SOS.

Notad de contestadores

Recomendamos a los contactos de emergencia que desactiven el buzón de voz de su teléfono para evitar demoras en la búsqueda de ayuda. Sin embargo, se aplican las siguientes medidas de seguridad si se recibe un buzón de voz:

El usuario puede finalizar la llamada actual haciendo clic en el botón SOS y la secuencia de llamada para continuar si el correo de voz no se desconecta automáticamente.

Un contacto de emergencia puede devolver la llamada al reloj si se desconecta. Recuerde que el reloj podría estar llamando al siguiente contacto a menos que se haya detenido la secuencia de llamada.



Guia de Usuario

Alarma de caídas

El reloj detecta automáticamente una caída. Cuando esto ocurre, emite un mensaje de advertencia al usuario.



Algunas actividades cotidianas como practicar deportes o incluso sentarse bruscamente pueden activar la alarma de caída.

El usuario tiene un breve periodo de tiempo para cancelar la alarma de caída pulsando el botón Cancelar del reloj. Si no se cancela, se llamará a los contactos de emergencia.

TIPs

Es posible que el reloj no detecte todas las caídas reales.

Recomendamos encarecidamente al usuario que presione el botón SOS en cualquier situación de emergencia, si puede hacerlo.

Obtención de señal de GPS



Para obtener una ubicación inicial para las funciones GPS, úselo en exteriores o cerca de una ventana para que el dispositivo pueda detectar los satélites. Esto podría tardar unos minutos, dependiendo del entorno.

La funcionalidad del GPS puede no estar disponible o ser inexacta en algunas ubicaciones (por ejemplo, la disponibilidad o precisión de la ubicación del GPS puede verse afectada dentro de edificios o cerca de edificios altos u otras características altas o subterráneas).

El reloj también proporciona Wi-Fi, posicionamiento LBS, cuando el GPS no está disponible, cambiará a Wi-Fi y LBS para la localización.

El Wi-Fi doméstico y las balizas brindan información dentro y fuera del hogar, además de optimizar la vida útil de la batería del reloj.

Tenga en cuenta que el servicio de seguimiento de Wi-Fi y LBS no es 100% preciso, solo se puede utilizar para aproximar su ubicación.

Especificaciones

- Dimensiones: 46,9 mm x 41,7 mm x 15,4 mm (1,84 pulg. x 1,64 pulg. x 0,60 pulg.).
- Peso: 38 g (1,34 oz).
- Batería: Recargable, 3,8 V, 600 mAh.
- Voltaje de carga: 5 V/CC, 1,0 A.
- Impermeabilidad: IP67.
- 4 tecnologías de localización: GPS, Beacon, Wi-Fi, LBS.

Guia de Usuario

TIPs

Apague el reloj en el avión y respete las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en el avión.



Cuidados

Acceso a la app

Para acceder a nuestra **app** ingrese busque en su store **SMART-LOCATOR** o escanee el QR adjunto



Ingresa a la App con las credenciales que le enviamos por email.

Conexión via Bluetooth

Coloque el dispositivo en la base de carga durante más de 30 segundos y se emparejará automáticamente a través de Bluetooth.



www.cuidados.com.ar
IG: cuidadosarg